

CLEARBLUE PLUS Test de grossesse Stylo/1

Prix au 07/03/2020 à 23:39

5.5 € TTC Disponibilité : En stock

Indications

Réaction immunologique utilisant des anticorps monoclonaux anti-hCG migrant par capillarité sur une membrane et révélateurs de l'hormone de grossesse hCG. La visualisation de la présence d'hCG est réalisée par une réaction « sandwich » au niveau de la fenêtre de résultat entre les anticorps monoclonaux et l'hCG.

La présence d'hCG se manifeste par l'apparition d'une ligne bleue verticale.

La ligne bleue horizontale apparaît par passage du liquide.

Sur la petite fenêtre de contrôle, une ligne bleue verticale doit toujours apparaître validant le bon déroulement du test.

Seuil de sensibilité : 25 UI d'hCG/litre d'urine.

Fiabilité : supérieure à 99 %.

Temps de réaction : 2 minutes.

Composition

Test de grossesse : Bâtonnet-test, avec tige absorbante, fenêtre de résultat et fenêtre de contrôle, boîtes de 1 (ACL 422556.9) , sous emballage aluminium individuel

Dispositif conforme à la Directive européenne sur les dispositifs de diagnostic in vitro (IVDD 98/79/EC) et doté de la certification CE.



Vente exclusive en pharmacie.

Fabriqué par : SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH.

Posologie

Le test peut être effectué à n'importe quel moment de la journée.

Ôter le capuchon de protection et tenir la tige du bâtonnet vers le bas sous le flux d'urine pendant 5 secondes sans inonder les fenêtres de lecture. Replacer le capuchon protecteur. Lire le résultat :

Résultat positif (enceinte) : un "+" bleu apparaît dans la grande fenêtre en 1 minute.

Résultat négatif (pas enceinte) : un "-" bleu apparaît dans la grande fenêtre.

Dans tous les cas, un trait vertical doit apparaître dans la petite fenêtre de contrôle.