

MY TEST Test de grossesse B/1

Prix au 09/03/2020 à 02:10

4.5 € TTC Disponibilité : Épuisé

Indications

Détection de grossesse dès le 1er jour de retard des règles.

Le test urinaire My test est un test de grossesse rapide, simple d'utilisation et fiable, à réaliser à domicile.

Des tests en laboratoire ont montré que MY TEST est fiable à plus de 99%.

Composition

Posologie

A quel moment réaliser le test ?

L'urine de n'importe quel moment de la journée peut être utilisée pour détecter une grossesse. Il est toutefois recommandé d'effectuer le test le matin car c'est au moment du réveil que les urines



présentent un taux élevé optimal d'hCG. Evitez par ailleurs de boire trop de liquide avant de réaliser le test.

Comment réaliser le test ?

- 1-Déchirer l'emballage selon la marque prévue à cet effet et retirez le test urinaire.
- 2-Tenez fermement d'une main l'extrémité blanche du test. Otez le capuchon de l'autre main.
- 3-Tenez le test vers le bas et placez la bandelette sous le jet urinaire pendant au moins 3 secondes jusqu'à ce qu'elle soit entièrement humidifiée.
Ne pas uriner au-dessus de la marque bleue !
Il est également possible de tremper la bandelette pendant au moins 3 secondes dans l'urine recueillie dans un récipient propre et sec, en plastique ou en verre.
- 4-Replacer le capuchon et consultez le résultat dans les 5 minutes suivantes.
Ne pas interpréter le résultat au-delà de 5 minutes.

Comment interpréter le résultat ?

L'échantillon d'urine déposé sur le réactif migre par capillarité le long de la membrane.
Un trait de couleur claire apparaît dès que l'hormone hCG de l'échantillon d'urine atteint la fenêtre test (T). On peut considérer le test comme étant négatif lorsqu'il n'apparaît pas de trait.
Un trait coloré apparaît dans la fenêtre de contrôle (C) lorsque le test a été effectué correctement.

Négatif : pas enceinte.

Positif : enceinte.

Attention ! Lorsque la couleur des traits est très faible, nous vous recommandons d'effectuer un nouveau test dans les 48 heures.

Si le test indique que vous êtes enceinte, consultez votre médecin qui saura vous renseigner sur la marche à suivre.