

THERAPEARL Multi zones



Prix au 09/03/2020 à 03:43

8.6 € TTC Disponibilité : En stock

Indications

Boîte de une compresse Multi zone 19,1 cm x 11,4 cm réutilisable.

Thérapie non médicamenteuse pour soulager la douleur et l'inflammation associées aux tensions et entorses musculaires, aux gonflements faisant suite à une intervention chirurgicale, à des soins esthétiques, à une allergie, ainsi que de nombreuses affections sources de douleurs.

Hypoallergéniques et non toxiques, les compresses THERA°PEARL utilisent une technologie ®Pearl innovante qui absorbe et libère de la chaleur et du froid pendant 20 minutes (durée recommandée par les médecins), offrant ainsi une thérapie extrêmement efficace

Grossesse, Fertilité, Allaitement

convient à l'allaitement

convient à la fertilité

convient à la grossesse

Posologie

Pour un soulagement glacé, refroidissez THERA°PEARL dans le congélateur ou dans le réfrigérateur pendant au maximum deux heures. Pour obtenir une chaleur pénétrante, placez-le dans le micro-ondes (la durée dépendra de la taille de la compresse). Notre technologie Pearl maintient une plage de température confortable et les compresses maintiennent leur température pendant 20 minutes, la durée d'application recommandée par les médecins.

Précautions d'emploi:

Testez toujours la température avant d'appliquez la compresse de perles sur vous.

Une température trop élevée ou une application prolongée peut entraîner des brûlures.

Consultez votre médecin avant d'utiliser le produit si vous avez une peau irritée ou présentant des lésions, très sensible ou insensible.

Ne surtout pas percer.

N'utilisez pas cette compresse chez le nourrisson.

Utilisez le produit sous la surveillance d'un adulte s'il est appliqué sur un enfant.

Un temps de chauffe au-delà de la durée recommandée peut endommager la compresse.

Consultez un médecin en cas de douleurs extrêmes, prolongées ou chroniques.